

## Eine ideale Kombination:

### LIGASANO® weiß

Gemichtporiges, vergleichsweise grobporiges geschäumtes Polyurethan



### LIGASANO® orange

Offenporiges, großporiges Zellgitter mit entfernten Zellmembranen



Die schnell nachlassende Druckspannung des Verbandstoffes LIGASANO® weiß erlaubt eine nahezu gleichmäßige Verteilung des Auflagedrucks und damit eine Vermeidung der gefürchteten Druckspitzen.

→ LIGASANO® weiß fördert im Hautkontakt die periphere Durchblutung, die Druckresistenz des Patienten erhöht sich. Schweiß wird aufgenommen, der Patient hat dadurch eine normale Hautfeuchtigkeit und im Zusammenspiel mit dem mechanischen Reiz auch eine Hautpflege. Der Erhalt des physiologischen Hautmilieus wird durch LIGASANO® weiß unterstützt.

→ LIGASANO® orange ist luft- und flüssigkeitsdurchlässig wie ein Sieb und verhindert dadurch Wärme- und Feuchtestau. Die ideale Ergänzung zu LIGASANO® weiß.



## Verfügbare Packungsgrößen:

Art.-Nr.	PZN	Versandeinheit
36198-010	20279458	LIGASANO® PLANTAFIT® Set Gr. 42–47 (linker und rechter Fuß) bestehend aus: – 2 x LIGASANO® PLANTAFIT® orange 2 cm in Fußform plus Unterstützung der medialen Wölbung in 2 cm und 1 cm – 2 x LIGASANO® PLANTAFIT® weiß in Fußform, 1 cm dick – 2 x LIGASANO® PLANTAFIT® weiß in Fußform, 2 cm dick – 2 x Fixierstrumpf
15197-020	20346427	20 Stück LIGASANO® PLANTAFIT® weiß 1 cm dick, in Fußform, Gr. 42–47, Nachkaufpackung
15198-020	20346433	20 Stück LIGASANO® PLANTAFIT® weiß 2 cm dick, in Fußform, Gr. 42–47, Nachkaufpackung

(Alle LIGASANO® PLANTAFIT® Produkte sind rezeptierbar und erstattungsfähig.)



LIGASANO® PLANTAFIT® Set plus Fixierstrumpf (ohne Abb.)

LIGASANO® PLANTAFIT® weiß 2 cm dick



LIGASANO® PLANTAFIT® weiß 1 cm dick



Made in Germany

LIGAMED® medical Produkte GmbH

Pfannenstielstr. 2 • D - 90556 Cadolzburg  
Tel. 09103 / 2046 • Fax 09103 / 2796 • E-Mail: info@ligamed.de

[www.ligasano.com](http://www.ligasano.com)

Info 02131 Stand 2026-04 © LIGAMED® medical Produkte GmbH in D-90556 Cadolzburg.

# LIGASANO®



# PLANTAFIT®

## Intelligente Druckverteilung. Einfach anwendbar.

Standardisierte plantare Druckverteilung für die Phase zwischen laufender Behandlung und einer weiterführenden, individuell geeigneten Versorgung.




Für den diabetischen Fuß

LIGASANO®  
*wirkt einfach*

CE 0297

**Konzipiert für die Interimsversorgung beim diabetischen Fuß** in Kombination mit einer geeigneten temporären Schuh- oder Entlastungsversorgung:

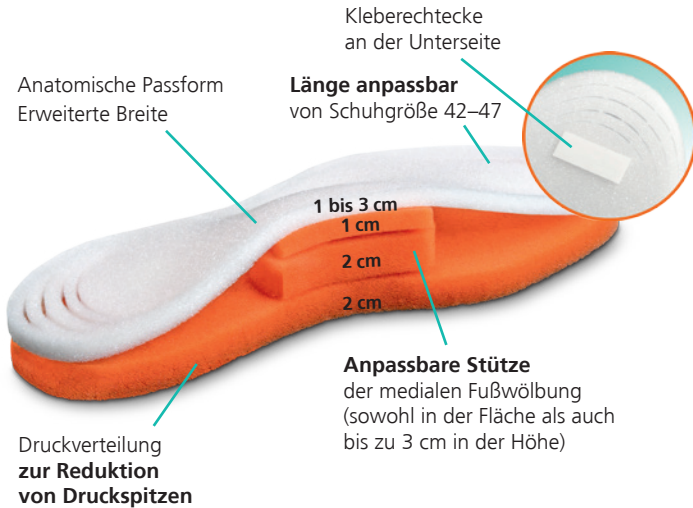


Die fußförmigen LIGASANO® PLANTAFIT® Elemente lassen sich über **perforierte Konturen** einfach an die jeweilige Fußgröße anpassen. Eine Schere ist dafür in der Regel nicht erforderlich.

Die **Unterstützung der medialen Fußwölbung** kann zusätzlich über entfernbare Konturen und Kleberechtecke an der Unterseite angepasst werden. Sie ist optional und kann weggelassen werden, wenn sie klinisch nicht sinnvoll ist, z. B. beim Charcot-Fuß.


Um die Druckverteilung über eine **möglichst große Kontaktfläche** zu erhalten, sollte LIGASANO® PLANTAFIT® die belastete plantare Fläche vollständig abdecken und nicht zu knapp angepasst werden.

**Bitte beachten:**

LIGASANO® PLANTAFIT® ist als Interimsversorgung für die klinisch sensible Übergangsphase konzipiert, bis eine weiterführende, entlastende Schuh- bzw. Folgeversorgung verfügbar ist.

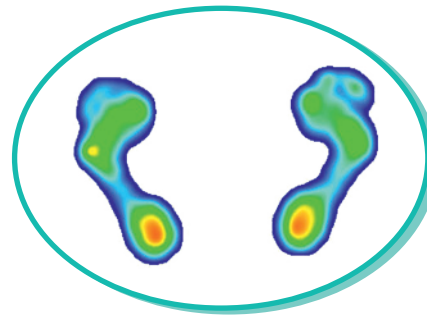

**Ohne kontrollierte Druckverteilung:** Lokale Druckspitzen können Gewebe zusätzlich belasten

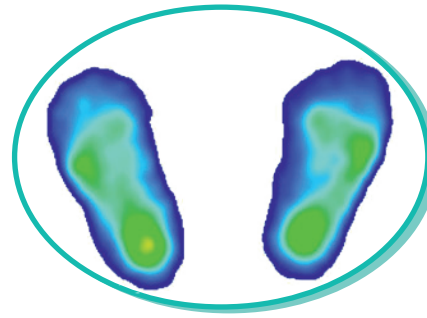

Mit LIGASANO®:  
Druckverteilung, reduzierte Spitzendrücke

**Druckverteilung über den gesamten Fußdruckverlauf:**

LIGASANO® PLANTAFIT® wirkt auf den gesamten plantaren Fußdruckverlauf, steigert die Kontaktfläche und reduziert Druckspitzen nicht nur lokal, sondern flächig.

Das Ziel ist eine standardisierte Druckverteilung in einer klinisch sensiblen Phase der Versorgung.

Zur Vermeidung asymmetrischer Belastung durch Höhendifferenzen sollte LIGASANO® PLANTAFIT® immer an beiden Füßen angelegt werden.


**Interne Patienten-Tests mit statischer Messmethode zeigten folgende Ergebnisse:**

- ▶ Reduktion der Druckspitzen um ca. 20 %
- ▶ Reduktion des Durchschnitts-Drucks um knapp 30 %
- ▶ Verdoppelung der Auflagefläche des Fußes: Dadurch effektive Druckverteilung

Auch bei einer zweiten Messung nach 24 Stunden Tragezeit zeigten sich noch ähnliche Werte, insbesondere im medialen Vorfuß.

**Weitere Produktvorteile:**

- ▶ Zeitsparend
- ▶ Risikoarm
- ▶ Einfach anpassbar
- ▶ Standardisiert in der Anwendung

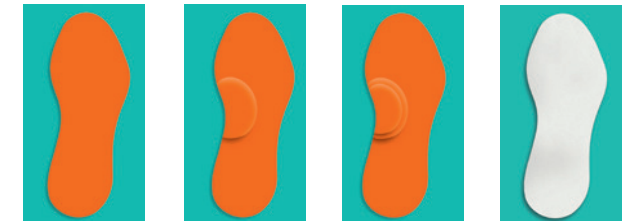

**Empfohlene Dicke von LIGASANO® weiß je nach Patientengewicht:**

Da die Druckreduktion des Materials mit zunehmendem Körpergewicht sinkt, empfehlen wir Ihnen folgende Dicken der Einlage LIGASANO® weiß:

- < 80 kg: 1 cm LIGASANO® weiß**
- 80 bis 100 kg: 2 cm LIGASANO® weiß**
- >100 kg: 3 cm LIGASANO® weiß**

Je nach Beanspruchung sollte LIGASANO® PLANTAFIT® weiß nach 1 bis 3 Tagen Tragezeit ausgetauscht werden, um die gewünschte Wirkung aufrechtzuerhalten.

Mit dem mitgelieferten Fixierstrumpf (bitte vorher auf links drehen) wird LIGASANO® PLANTAFIT® am Fuß des Patienten fixiert. Anschließend wird eine temporäre Schuh- oder Entlastungsversorgung angelegt.